



# Inovys II

## L70

### Sistema de asiento granulado

**VERMEIREN** ha desarrollado el sistema de posicionamiento L70 en combinación con la silla de ruedas Inovys II existente.

Para las personas que están obligadas a sentarse en una posición pasiva, Inovys L70 ofrece una comodidad ideal. Los cojines rellenos de poliestireno en el respaldo, el asiento y la zona de las piernas aseguran la distribución de la presión y siguen el contorno del cuerpo.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Sedestación placentera para usuarios pasivos.

**VERMEIREN** puede ofrecerte una solución completa y dinámica que proporciona máximo soporte postural para todo el cuerpo. Todos los tapizados incluyen una cremallera que permiten su retirada y limpieza.

**Inovys II L70** está equipada con un reposacabezas multiajustable en altura y ángulo sin necesidad de herramientas. Como opción, puede montarse L58G, que adopta automáticamente la forma deseada. La gran variedad de opciones significa que la Inovys II L70 puede ser completamente adaptada a las necesidades y deseos de casi cualquier usuario.

⊕ Todos los cojines están rellenos con gránulos de poliestireno resiliente que proporcionan soporte perfecto para el cuerpo adaptándose a sus contornos.

⊕ Añadiendo o retirando gránulos de poliestireno la presión sobre el cuerpo puede aumentarse o reducirse.

⊕ Mediante varios ajustes (cabeza, espalda, asiento, sección de piernas) la silla de ruedas puede ser ajustada óptimamente a cada usuario.

⊕ Los reposabrazos confortables hacen sentir al usuario seguro y cómodo, permitiéndole relajarse completamente.

El ajuste personalizado es posible gracias a la regulación del ángulo de los reposapiés, reposapiernas, asiento y respaldo. Los frenos de tambor y frenos convencionales adicionales garantizan la seguridad del usuario durante su uso.

Como opción, está disponible **la funda de felpa lavable** que proporciona una mayor higiene durante el uso diario de la Inovys II L70.



## 3 compartimentos independientes



- Compartimento de pecho -



- Compartimento de asiento -



- Compartimento de piernas -

*Cada compartimento dispone de un relleno de bolas que proporciona soporte óptimo al cuerpo y sus contornos*



*Fácil separación de los compartimentos mediante cremallera*



B12 - Mesa



B20 - Cinturón de seguridad



B52 - Portasueros



B54 - Funda felpa



B74 - Frenos tambor



B77 - Antivuelcos



B83 - Soporte bombona



L58G - Reposacabezas confort



L71 - Reposabrazos extraíbles granulados



*Posición de descanso personalizada gracias a las posibilidades de ajuste personalizado de asiento, respaldo, reposapiernas y reposapiés.*

## Relleno granulado



Para ofrecer el máximo confort, **VERMEIREN** ha seleccionado gránulos de calidad premium con una densidad de 15kg por metro cúbico. Cada gránulo mide entre 3,6 y 5,6 mm de diámetro y tiene un efecto aislante, que proporciona sensación de comodidad cuando entra en contacto con el cuerpo humano. Estos gránulos son producidos con 100% poliestireno expandido y han sido certificados por el National Institute of Hygiene como no peligrosos para la salud humana. Pueden ser reciclados, lo que supone una huella ecológica mínima.



**Rellenado:** Tras un largo uso, puede sentir que sus cojines necesitan relleno adicional, o incluso reducirlo, dependiendo de sus necesidades. Contacte con su proveedor **VERMEIREN** de confianza para adquirir gránulos con los que rellenar sus cojines y reafirmar su posicionamiento.

## Círculo completo

Si necesita moverse, necesita ruedas. Y las ruedas son uno de los elementos fundamentales de nuestros productos. Un eje sólido combinado con radios, llantas, y un tubo relleno de aire. Eso es todo lo necesario para avanzar. Básico, pero al mismo tiempo esencial. Y esa es la razón por la que **VERMEIREN** decidió producir este elemento clave internamente.

Desde las pequeñas ruedas delanteras a grandes ruedas traseras y ruedas macizas de goma para sillas electrónicas... Cada elemento es manufacturado internamente, permitiéndonos mantener la atención sobre la producción y, sobre todo, sobre la calidad de la que nos enorgullecemos.

## Información técnica

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ■ Ancho total                                     | 680 - 730 mm  |
| ■ Altura total (sin reposacabezas)                | 990 - 1060 mm |
| ■ Largo total                                     | 1280 mm       |
| ■ Ángulo del respaldo                             | 0° - 45°      |
| ■ Ángulo entre la vara del reposapiés y la paleta | 73° - 107°    |
| ■ Altura reposabrazos                             | 220 - 320 mm  |



*El material aislante proporciona una sensación cálida y confortable*

## Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

## Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Inovys II L70** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Altura de asiento      | 510 - 580 mm                                                                                                                                                                |
| ■ Altura de respaldo     | 550 - 600 mm / 700 - 750 mm                                                                                                                                                 |
| ■ Profundidad de asiento | 460 - 520 mm                                                                                                                                                                |
| ■ Peso                   | 38 kg                                                                                                                                                                       |
| ■ Peso máximo usuario    | 135 kg                                                                                                                                                                      |
| ■ Información adicional  |   |

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para más información contacte con su distribuidor local.